

## FICHA TÉCNICA

**Referencia:** AB683910002

**GTIN-13:** 8428763014850

**Descripción:** Turbina plástica reutilizable marca MIR con malla y muesca para Espirómetro.



**Compatible con:**

- Spirolab III.
- Spirolab II SSB.
- Spirobank G.
- Spirobank USB
- Minispir
- Spirolab New
- Spirobank II (basic,Advanced)
- Spirodoc

**Características:**

- Estabilidad de larga duración
- Alta precisión
- Fácil de limpiar
- Diseñada de acuerdo al estándar ATS
- Garantizadas en todas las condiciones ambientales



**Mantenimiento:**

Para limpiar la turbina quitarla tirando de ella suavemente de su alojamiento, girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando ligeramente. Puede ser útil empujarla suavemente desde la parte inferior con un dedo.

Sumergir la turbina en un líquido detergente y frío, agitarla y moverla dentro del líquido para eliminar cualquier impureza que se haya depositado en su interior. Dejarla en remojo por lo menos el tiempo recomendado por el fabricante de la solución limpiadora, como se indica en las instrucciones de uso que vienen con el equipo.

**Precacuciones:** La presencia de cuerpos extraños puede comprometer la precisión en la medición. No poner nunca la turbina bajo un chorro directo de agua o de aire o en contacto con fluidos con altas temperaturas. Limpiar siempre la turbina entre pacientes.

**Almacenamiento:** Para el almacenamiento se deben seguir las instrucciones del producto.