



weelko

Welcome to  weelko

HighTech Combi Hydro WKB005

- Hidrodermabrasión.
- Ultrasonido.
- Scrubber (peeling ultrasónico).
- Cold Hammer.
- Radiofrecuencia bipolar.
- Oxygen Spray.





HighTech Combi Hydro

WKB005

El WKB005 es un equipo de avanzada tecnología, que combina lo mejor de Weelko para hacer tratamientos completos e intensivos de limpieza facial profunda, renovación y nutrición de la piel, para ofrecerle a nuestros clientes los mejores resultados en corto tiempo.

HighTech Combi Hydro WKB005




El HighTech es un equipo digital de belleza con pantalla táctil, muy completo, que combina 6 herramientas super importantes para realizar una limpieza facial profunda.

- 1 Manípulo de Hidrodermabrasión, con boquillas de recambio.
- 1 manípulo Ultrasonido.
- 1 manípulo Scrubber (peeling ultrasónico).
- 1 manípulo Cold Hammer.
- 1 manípulo de Radiofrecuencia.
- 1 manípulo de corriente Galvánica.
- 1 manípulo de Oxygen Spray.
- 1 Unidad Principal
- 1 Cable de conexión.

Nota: Los equipos vienen con un plástico adhesivo muy delgado, que protege la pantalla de posibles rayones durante el embalaje, y generalmente se marca, se puede retirar el mismo una vez desembalado.

Detalles de conexión

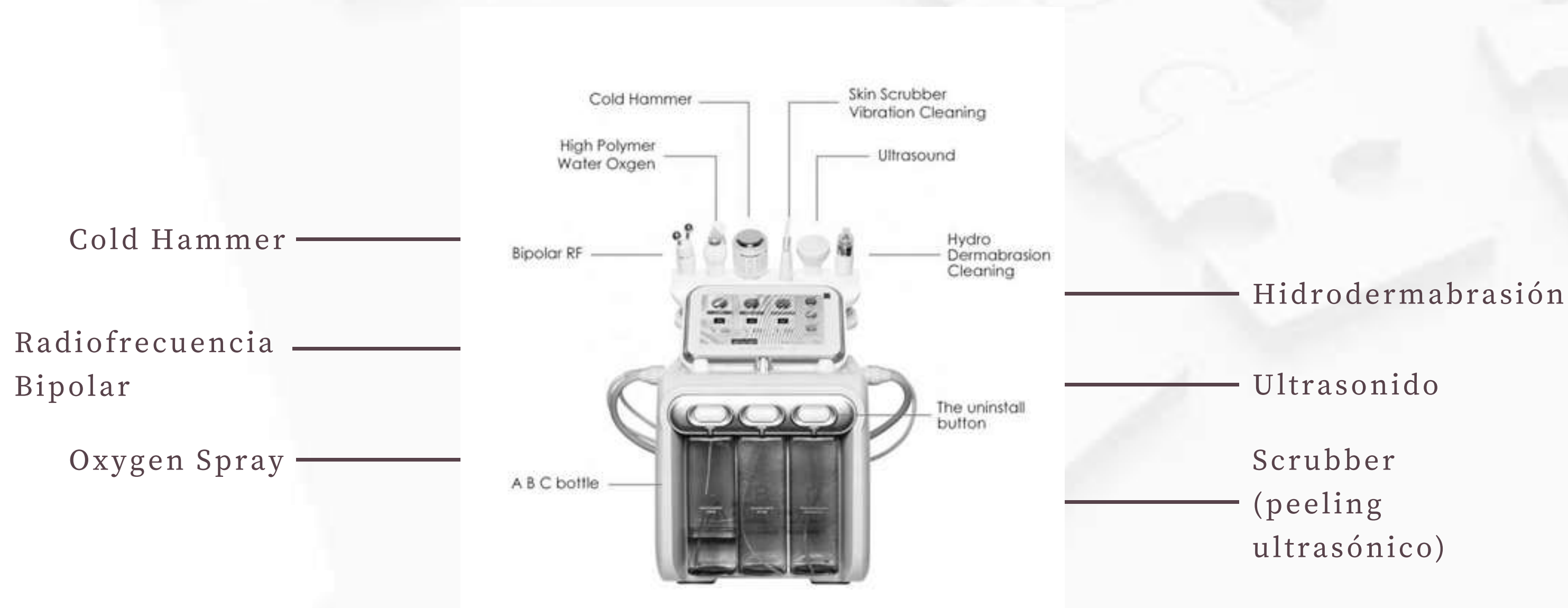

Los manípulos deben reposar sobre la estructura acrílica instalada en la parte posterior del equipo, para evitar posible accidentes y caída de los mismos.



10T PRO

Para encender el equipo encontraremos un botón en el lado derecho, y luego hacemos clic en la pantalla para proceder a seleccionar del menú, el tratamiento a realizar.


HighTech Combi Hydro

WKKB005



Equipo diseñado para tratamientos no invasivos de limpieza profunda de la piel, hidratación, nutrición y oxigenación.

Indicado en tratamientos para eliminar puntos negros, acné, suciedad acumulada en la piel y para pieles grasas. También para nutrir, aumentar la elasticidad y tono de la piel.

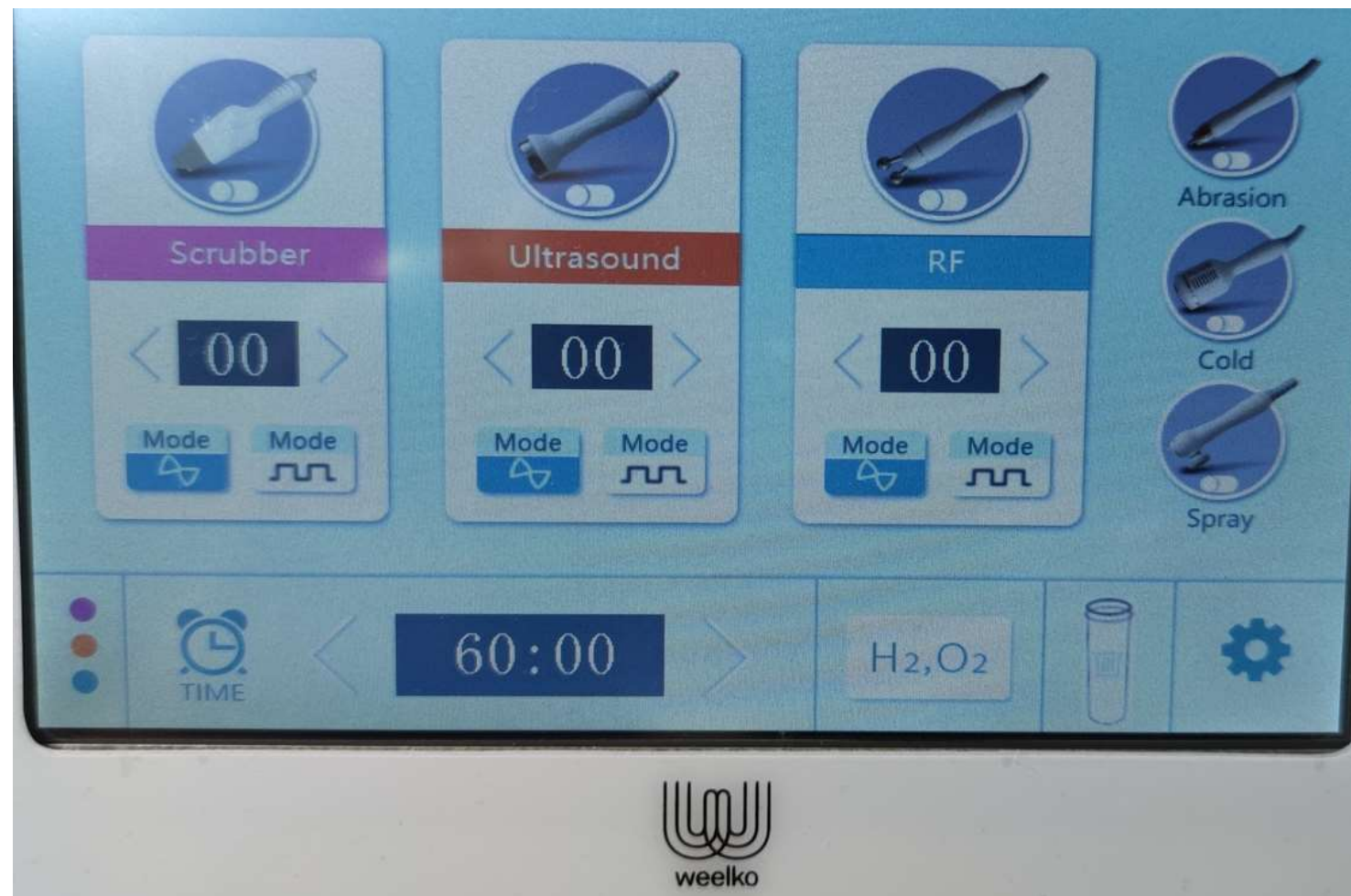

Para comenzar debemos seleccionar el tipo de tratamiento deseado:

- **Scrubber:** para activarlo haz clic en la imagen del manípulo Scrubber, luego programa la intensidad que va del 1 al 10, el Mode (continuo o pulsado), y el tiempo de acuerdo con el tratamiento que vas a realizar.
- **Ultrasonido:** para activarlo debes hacer clic en la imagen donde está el manípulo Ultrasound, luego programas la intensidad que va del 1 al 10, el Mode (continuo o pulsado), y el tiempo de acuerdo con el tratamiento que vas a realizar.
- **Radiofrecuencia facial bipolar:** para activarla debes hacer clic en la imagen del manípulo de RF, luego programas la intensidad que va del 1 al 10, el Mode (continuo o pulsado), y el tiempo de acuerdo con el tratamiento que vas a realizar.

- **Abrasión:** Activa el tratamiento de Hidrodermoabrasión.
- **Cold:** activa el Cold Hammer.
- **Spray:** Activa la función de Oxygen.
- **Time:** determina el tiempo de tratamiento.

En cada manípulo encontrarás un botón con el cual puedes comenzar o finalizar el tratamiento.



Mode

Continuo: la emisión de la onda tanto en el peeling ultrasónico, el ultrasonido, y la radiofrecuencia no se interrumpe, lo que potencia el tratamiento, generando más calor en la zona tratada y aumento de la circulación.

Pulsada: la emisión de onda se interrumpe en forma de pulsaciones, por lo que la emisión es menor, esto disminuye el efecto sobre la piel y permite el trabajo con potencias más altas. También utilizado para zonas donde el tejido óseo sea más prominentes.

La Hidrodermabrasión es un tipo de limpieza profunda, menos invasivo, en el que utilizamos la presión de agua para eliminar la piel muerta, y aportarle a la misma sustancias que limpien e hidraten, y de esta manera mejoren la calidad de la piel. Debido a su alcance profundo es un tratamiento ideal para todo tipo de piel, especialmente: pieles deshidratadas, pieles con puntos negros, manchas, acné no muy severo. La combinación de hidratación, exfoliación, y una succión muy suave elimina efectivamente impurezas, a la vez oxigena la piel. Durante el tratamiento, el dispositivo utiliza los cabezales para aportar un flujo de sustancias que nutren y limpian la piel, logrando suavizar las líneas finas y las arrugas y mejorando la elasticidad. Con cada paso, la piel se exfolia y se hidrata varias veces, mediante una succión muy suave que elimina impurezas y puntos negros. Las boquillas tienen forma de espiral, por lo que son excelentes para liberar impurezas e penetrar producto, que son altamente aprovechados por la piel. Una de las diferencias más significativas con la microdermabrasión, es que esta exfoliación se realiza con la piel húmeda, y a medida que se van incorporando estas sustancias durante el procedimiento se va purificando, lo que genera una limpieza profunda de los poros, mientras se incorporan sustancias que nutren y que, además, cumplen una importante función para la piel, favoreciendo el recambio celular.



La Hidrodermoabrasión

Su mecanismo de acción a base de agua nos da un efecto de purificación profunda, de la superficie de la piel, y una absorción más eficaz de las moléculas de los productos usados. Es un tratamiento intensivo de renovación y nutrición celular, que deja un brillo inigualable en la piel. Con tres pasos fundamentales:

- Limpieza de la piel.
- Eliminación de piel muerta y capa córnea.
- Hidratación y oxigenación.

Hidrodermabrasión

Seleccione la boquilla a utilizar y luego ajuste la intensidad de succión y volumen de agua, según la piel del paciente y la zona que quiera tratar.

Este equipo posee varias boquillas que se pueden cambiar de acuerdo con el tratamiento.

También seleccionaremos la botella del producto a utilizar:


A: Producto de limpieza facial.

B: Tratamiento intensivo según el tipo de piel.

C: Producto de limpieza del equipo.

D: Producto oxigenante.

Para obtener óptimos resultados es importante la utilización de productos de alta calidad y apropiados para el tratamiento Hydrafacial. Dependiendo de la presentación del producto podrá ser diluido en agua o no, lo ideal es trabajar con la medida justa de producto que se va a utilizar para no desperdiciarlo, para un tratamiento completo se puede utilizar 50ml de producto concentrado y 50ml de agua. Sobre todo no dejar producto varios días en el equipo, las indicaciones dependerán del fabricante.

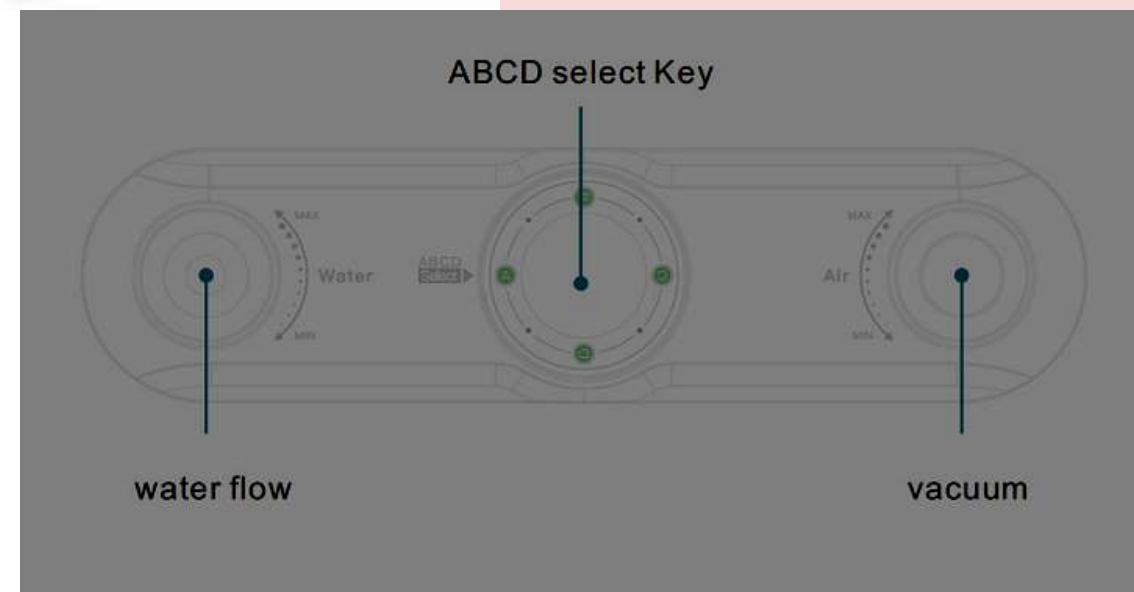

Coloque las botellas traseras y delanteras. En caso de querer separar las botellas traseras, tiene que desenroscarlas. Para las delanteras, primero tiene que presionar el botón superior y podrá extraerlas.

Escoja la botella según el producto que quiera utilizar con la rueda central en la letra de la botella deseada.

Limpie las botellas antes de rellenarlas con los productos de belleza. Cuando tenga que vaciarlas para su limpieza después de un tratamiento, asegúrese de que el equipo no está en funcionamiento porque el producto podría entrar dentro del equipo y dañar sus componentes.

Peeling Ultrasónico

Tratamiento diseñado para limpiar profundamente la piel, eliminando células muertas y capa córnea; mediante una espátula que genera ondas ultrasónicas, y produce vibración que en contacto con el tejido nos ayuda a arrastrar todos los residuos, así como favorecer la estimulación de la piel.

Scrubber (Peeling ultrasónico) Escoja el tiempo del tratamiento, regule la intensidad del 1 al 10 con las flechas y escoja el tipo de onda con los botones “MODE”: Se recomienda el uso de onda continua (izquierda) para tratamientos de tejidos más gruesos, en cambio la onda pulsada (derecha) es ideal para zonas más sensibles y de tejidos más finos. Mantenga pulsados simultáneamente los botones laterales que tiene la espátula y colóquela inclinada unos 45°. El tiempo de tratamiento es aproximadamente de unos 10-15 minutos.

Ultrasonido

Ultrasonido facial de 1Mhz, método no invasivo e indoloro, de ondas ultrasónicas que al entrar en contacto con la piel eleva su temperatura y tiene un efecto directo en el tejido tisular, promueve la liberación y eliminación de células grasas, mejora la nutrición y oxigenación de los tejidos, activa la circulación venosa, ya que mejora el flujo sanguíneo especialmente a nivel dérmico, es muy utilizado para tratamientos post-quirúrgicos, fibrosis, nutrición y oxigenación de la piel, ya que aumenta la permeabilidad de la membrana y la capacidad regenerativa de los tejidos.

Cold Hammer

Indicado después de tratamientos de rejuvenecimiento de la piel para mejorar tonicidad, reducción de la sensibilidad. Es muy beneficioso después de tratamientos de dermoabrasión, ya que ayuda a cerrar los poros, suavizar, calmar, reparar la piel y reducir el enrojecimiento y tonificar.

Radiofrecuencia bipolar

Como su nombre lo indica es una radiofrecuencia que posee dos electrodos a través de los que circula la corriente electromagnética, alcanzando la dermis y generando una activación en las fibras de colágeno, haciendo que se contraigan, aumenten y por ende mejore la elasticidad de la piel. El aumento de temperatura de esta radiofrecuencia bipolar de 2 MHz es muy superficial, por eso está especialmente indicada para corregir la flacidez en rostro y cuello.

Oxygen spray

Este tratamiento está diseñado para nutrir la piel del rostro. La técnica de rociar la epidermis con vitaminas, minerales, nutrientes esenciales, hace que las moléculas del producto que queremos que la piel absorba, penetren de una forma mucho más directa, generando una piel más suave, tersa y súper hidratada.

Protocolo

Antes de comenzar el tratamiento se debe hacer una evaluación previa de la piel del rostro, se recomienda hacer un registro fotográfico.

- Quitar maquillaje, o cualquier tipo de producto de la piel.
- Puede utilizarse vapor o compresas calientes para abrir poros previamente.
- **Skin Scrubber:** es el complemento perfecto a este tipo de limpieza, recomendamos ir de menos a más y llegar a 5 de potencia para limpieza, en modo continuo. La paleta de este equipo debe ser utilizada sin guantes, y sujetarla por ambos lados para poderla accionar (polo + y -). Pasar espátula por el rostro de 1 a 2 veces de acuerdo con la superficie de la piel, primero un lado y luego el otro, siempre de forma ascendente. La piel debe estar un poco humedecida con tónico, algún producto de limpieza o desincrustante.



Protocolo

Hydrodermabrasión

Se cambiará de cabezal y se ajustará la intensidad de succión según la piel del cliente y la zona a tratar. Selecciona según el tratamiento:

Botella A, (face clean), se recomienda productos de limpieza profunda que tengan un efecto queratolítico o desincrustante, productos con principios activos como ácido láctico, alantoína (eliminación de células muertas), lo que buscamos en este paso es la regeneración de piel y limpieza profunda. Ajusta succión y volumen de agua, coloca la boquilla a utilizar. Haz pases cortos y largos, incluso toques, siempre ascendente, enfatizando el trabajo en la zona con mayores puntos negros, barbilla, zona T.

Protocolo

Hydrodermabrasión

Botella C: Es importante entre cada paso, limpiar el equipo, para lo que usaremos la Botella C con alguna sustancia desinfectante, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, trabajaremos con algún producto con el que limpiaremos el equipo para pasar al siguiente producto, puede ser alguna solución bactericida, detergente, que remueva bacterias, virus y hongos. Cada vez que pasemos de una botella a otra es recomendado limpiar el equipo, procederemos de la siguiente manera presionando con el dedo unos segundos un par de veces la boquilla, así que luego de usar la botella A pasamos a la C, se coloca la máxima succión, mayor intensidad de agua, cambia la boquilla de ser necesario y coloca el pulgar en la misma, tápala por 5 a 10seg. y luego destápala, repite de 3 a 4 veces, para así eliminar residuos del producto anterior.

Protocolo

Hydrodermabrasión

Botella B: una vez limpiado el equipo se procede a trabajar con el siguiente paso, cambiamos boquilla y trabajaremos con la botella B, para este paso se utilizará algún producto de hidratación y regeneración de la piel. Se recomienda el uso de productos con los siguientes principios activos: ácido salicílico (efecto antiinflamatorio y regenerativo). Pantenol (excelente para estimular la formación de nuevas células). Se procederá igual de abajo hacia arriba haciendo pases cortos, y trabajando un lado de la cara y el otro. Luego volvemos a limpiar el equipo con la botella C.

Botella D: (H₂O₂) una vez limpiado el equipo se procede a trabajar con el siguiente paso, **botella D**, en el recipiente trasero colocaremos algún producto oxigenante o nutritivo, ya que este será el último paso de la limpieza, por lo que aportaremos nutrientes específicos para cada tipo de piel, según el protocolo que estemos usando y los resultados que queremos conseguir. Se recomienda el uso de algún producto con los siguientes principios activos: producto con ácido hialurónico (proporciona elasticidad e hidratación), Alovera (humectante y promueve la cicatrización), péptidos (estimulan la producción de colágeno).

Protocolo

Spray Oxygen: Pasamos a trabajar con el spray Oxygen, colocamos en el envase de vidrio que va en el manípulo el producto que queremos hacer penetrar, puede ser una ampolla, algún producto oxigenante. Asegúrate al cambiar las boquillas que estén bien colocadas y no haya fugas, rocía de abajo hacia arriba, igual de un lado a otro. Luego volvemos a limpiar el equipo con la botella C.

Las recomendaciones de los principios activos de los productos son sólo sugerencias, lo ideal es que el profesional escoja alguna casa de productos que trabaje con este equipo.

Waste liquid: en este recipiente no se coloca ningún productos, solo se recogen los residuos de todos los líquidos, es importante vaciarlo al finalizar cada tratamiento.

Radiofrecuencia: aplicamos gel conductor, la intensidad sugerida es de 6, siempre a tolerancia del cliente, de forma continua, movimientos ascendentes y circulares, unos 10 a 15min. en todo el rostro, un lado y del otro.

Cold Hammer: colocar gel o tónico, aplicar de forma ascendente unos 10min.

Ultrasonido: trabajar con gel y algún producto especial para ultrasonido, con principios activos que potencien el tratamiento, la intensidad recomendada es de 4 a 6, modo continuo o pulsado. Hacer movimientos ascendentes y circulares, de 10 a 15 min. recomendados.

Finalizado el tratamiento podemos colocar una mascarilla de acuerdo con las necesidades de la piel del cliente, unos 15 a 20 min.

Ventajas del Hydrafacial HIGHTECH WKB005

- Limpia profundamente.
- Mantiene una piel suave, hidratada y luminosa.
- Mejora signos de la edad, como arrugas y líneas de expresión.
- Mejora la firmeza de la piel.
- Unifica el tono de la piel.
- Reduce la apariencia de poros dilatados.
- Trata acné y cicatrices

Indicaciones Hydrofacial HIGHTECH WKB005

Se puede hacer un tratamiento Hydrofacial cada mes o mes y medio, y también cada vez que se quiera conseguir que la piel luzca rozagante, como por ejemplo un evento especial. Por lo general de 30-60 minutos de tratamiento, entre las indicaciones están:

- Mejorar el tono.
- Combatir la textura desigual y arrugas.
- Limpieza facial profunda.
- Limpieza de poros.
- Regeneración del colágeno.
- Deshidratación.
- Mejorar los signos de la edad.
- Acné.
- Mejorar la hidratación de la piel y eliminar la apariencia de líneas de expresión finas.
- Hiperpigmentación y reducción de manchas, manchas solares.
- Control de grasa y puntos negros.
- Indicada para todo tipo de piel.



Contraindicaciones

- Embarazo y lactancia.
- Piel muy sensible.
- Rosácea.
- Dermatitis seborreica.
- Lesiones recientes, piel con heridas, infecciones, psoriasis, dermatitis o que no esté sana.
- Piel rasurada o depilada.
- En piel que han sido sometidas recientemente a peeling químico profundo, quemadura o cirugía.
- Alteraciones de la sensibilidad de la piel, sin poder diferenciar el frío del calor.
- Mala cicatrización.
- Historial previo de queloides.
- Áreas con tatuajes en el rostro o maquillaje definitivo.
- Afecciones cutáneas.
- Implantes metálicos.
- Procesos infecciosos u hongo.
- Acné severo.
- Precaución a la hora de trabajar tejidos con rellenos inyectados, y en el caso de clientes que recientemente se hayan inyectado ácido hialurónico, Botox o cualquier otro tipo de producto, debe esperar un tiempo prudencial para hacerse tratamiento con Hydrafacial.



Cuidados

- Se recomienda el uso de protector solar después de cada sesión.
- Tomar de 1,5 a 2 litros de agua al día para mantener la piel hidratada.
- Mantener hábitos de cuidado diario de la piel, limpieza y uso de cremas adecuadas al tipo de piel.
- La piel del rostro al ser más fina tiende a ser muy delicada y con mayor riesgo de quemaduras, por lo que en ningún momento debe dejarse fijo el ninguno de los manípulo.
- En algunos casos el tratamiento puede causar enrojecimiento de la piel, irritación e hinchazón, que mejorará con el tiempo.
- Es importante limpiar adecuadamente los manípulos, y las botellas dejarlas vacías sin producto, las boquillas las podemos limpiar con alguna solución antiséptica, incluso remojarlas.

Precaución

- Este tratamiento no está exento de riesgos, es por lo que debe ser aplicado por un profesional especialista en estética.
- El cliente y el profesional deben asegurarse de que no lleven objetos metálicos consigo durante el tratamiento.
- Se recomienda el uso de guantes aislantes por el profesional.
- No olvide aplicar suficiente cantidad de gel.
- Seguir en todo momento las recomendaciones de los profesionales del centro estético.
- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc.; con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

Advertencias

- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.
- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie, para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.
- Al finalizar la sesión, es importante la limpieza de los manípulos con algún producto antiséptico, después de cada tratamiento.
- Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento que la intensidad es la adecuada.
- Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
- No coloque ningún líquido sobre el equipo.
- Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
- Por favor, desmonte y monte el equipo por personal profesional.
- En caso de malfuncionamiento del aparato compruebe cuidadosamente todas las conexiones y contacte con un servicio técnico en caso de duda.

Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com



Welcome to  weelko